



ULTIMA A7

Instrukcja użytkowania



Nazwy elementów




Sposób użytkowania

1. Ustawienia

- Tryb adapter
- (1) Podłącz adapter prądu stałego do gniazda.
- (2) Podłącz zasilacz prądu stałego do gniazdzka sieciowego.

2. Przygotowanie

- (1) Wyjmij igłę ze sterylnego opakowania.
- (2) Dopasowując okrągłe sloty 1 do 2 urządzenia, popchnij kartridż z igłą poziomo do końca.
- (3) Zablokuj kartridż, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

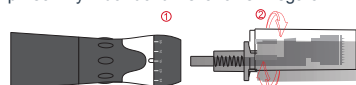

- (4) Regulację długości igły należy wykonać po włączeniu urządzenia.
- (5) Jeśli chcesz wyjąć kartridż z igłami, obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wypchnij poziomo, dopasowując okrągłe szczeliny (slot1 .slot2) do siebie.

Sposób użytkowania

3. Włącznik zasilania



4. Regulacja prędkości



Przekręć pierścień regulacji prędkości w celu dostosowania prędkości nakłuwania.

- Zwiększ prędkość przekręcając pierścień zgodnie ze wskazówkami zegara.
- Zmniejsz prędkość przekręcając pierścień przeciwnie do wskazówek zegara.

Sposób użytkowania

5. Regulacja długości igły

Możesz dostosować długość igły, obracając pierścień regulacyjny w prawo lub w lewo. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegaraspowoduje, że jego długość będzie większa.Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje, że jego długość będzie mniejsza.



Tabela referencyj

OBSZAR	CIENKA SKÓRA	GRUBA SKÓRA
Czolo	0,25 - 0,5 mm	0,5 - 0,75 mm
Pomiędzy brwiami	0,25 - 0,5 mm	0,5 - 1,00 mm
Nos	0,25 mm	0,5 mm
Obszar oczu	0,25 mm	0,25 - 0,5 mm
Kości policzkowe	0,5 mm	0,5 - 1,00 mm
Polki i broda	0,5 - 1,0 mm	1,0 - 2,00 mm
Górna warga	0,25 mm	0,25 - 0,75 mm
Blizy twarzy	1,0 - 1,25 mm	1,5 - 2,00 mm
Rozstęp	1,5 - 2,0 mm	1,5 - 2,00 mm
Blizny medyczne i oparzeniowe		2,0 - 2,50 mm

Specyfikacja

1. Urządzenie

Aparaty do stosowania terapii mikroigłowej oraz makijażu permanentnego za pomocą wibracji.

2. Klasyfikacja

- Rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: Urządzenie klasy II
- Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: Stosowana część pływająca
- Stopień ochrony przed przedostawianiem się wody: Standardowe wyposażenie (IPXO)
- Sposób działania: ciągłe działanie

3. Specyfikacja

- 1) Nazwa produktu: Auto-stamp Motor Meso Machine
- 2) Nazwa modelu: Ultima A7
- 3) Adapter: 5V, 1000mA
- 4) Waga: Pen 70g
- 5) Rozmiar: 160x23 (mm)

Środki ostrożności

⚠	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.
⚠	Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób: 1. Którzy mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C 2.Którzy mają alergię / hemofilie 3. Którzy mają metaliczne twarzą 4. Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne 5. Którzy regularnie odwiedzają szpital 6. Którzy przyjmują leki 7. Którzy mają mniej niż 12 lat
⚠	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie.
⚠	Nie należy używać w pobliżu miejsc o wysokiej temp., zapaleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilżacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
⚠	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
⚠	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
⚠	Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przestarzałego. Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).
⚠	Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia. Może powodować przerwania skóry.
⚠	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.
⚠	Przeprowadzaj kontrole urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.
⚠	Nikt inny niż operator nie może dotykać urządzenia. Może to spowodować wypadek lub awarię.

Specyfikacja

~	Prąd przemienny	EN	Numer seryjny
---	Prąd stały	IEC	Reprezentacja UE
II	Sprzęt klasy II	CE	Symbol CE
⚠	Uwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi	⚡	Producent
📅	Data produkcji	F	Zastosowana część pływająca

Gwarancja

- 1. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
- 2. W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z www.permanent24.pl
- 3. Zapewniamy serwis urządzenia w przeciągu od 1 do 14 dni od chwili otrzymania urządzenia wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
- 4. Nie objęte gwarancją są: uszkodzenia mechaniczne, złamanie kabla, przepalenie zasilacza.

Producent / importer

Importer: TRADERON
ul. Kieślowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska
VAT: PL6711009139

Konserwacja

1.Ogólne zasady konserwacji

- Pozostawiaj urządzenie z wyłączonym zasilaniem.
- Wytrzyj jego powierzchnię suchą szmatką.
- Przechowuj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury i wilgotności.
- Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy lub modyfikacji urządzenia przypadkowym serwisantom.

2. Rutynowa kontrola

- Upewnij się, aby sprawdzić urządzenie i adapter przed użyciem.
- Gdy używasz urządzenia, które nie było używane przez długi czas, upewnij się, czy działa poprawnie i bezpiecznie.

Zawartość opakowania

Pen	1 szt.
Kartridże	2 x M12 + 2 szt.
Instrukcja	1 szt.
Zasilacz oraz kabel	1 szt. / 1 szt.

ULTIMA A7

Instrukcja użytkowania

