




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Nazwy elementów 1

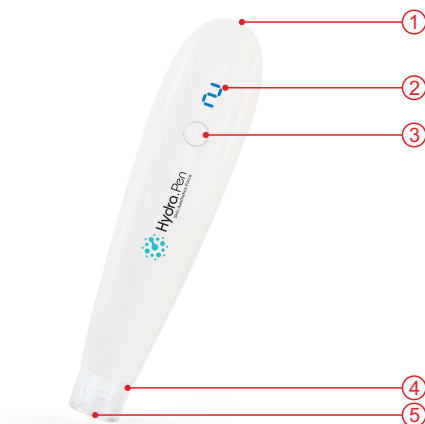

Nr	Opis
①	Interfejs zasilania
②	Wyświetlacz prędkości
③	Zasilanie / Przycisk prędkości
④	Pierścień oporowy
⑤	Kartridż

Opis akcesoriów 2



- ① Kartridż
- ② Pierścień oporowy
- ③ Zatyczka ochronna
- ④ Korek

Model bezprzewodowy


Urządzenie pracuje zarówno na wbudowanej baterii jak i zasilaniu przez kabel

1. Podłącz zasilacz do kabla
2. Włóż zasilacz do gniazda
3. Naładuj baterię

Status ładowania

- Wskaźnik zasilania świeci na czerwono podczas ładowania
- Wskaźnik zasilania zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania

Sposób użytkowania 3

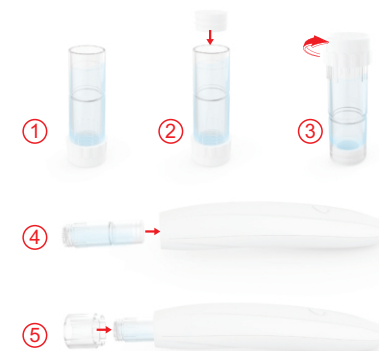

- ① Napełnij kartridż produktem kosmetycznym
- ② Umieść korek w dolnej części kartridża
- ③ Usuń zatyczkę ochronną
- ④ Umieść kartridż w Hydra penie
- ⑤ Zamocuj pierścień oporowy do Hydra pena
- ⑥ Uruchom urządzenie. Naciskaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy by uruchomości lub wyłączy urządzenie. Naciskaj przycisk by zmienić prędkość działania. Pracę rozpoczyna od najwolniejszych obrotów.

Uwaga

W celu ochrony urządzenia nie obracaj pena pionowo by zapobiec wlewaniu się płynu do wnętrza.

Informacja o kartridżach 4



Nano-HS

Nano-HR

H12

Zawartość opakowania

Element	Ilość
Urządzenie/pen	1 szt.
Kartridże	2 szt.
Instrukcja	1 szt.
Zasilacz	1 szt.
Kabel	1 szt.
Pierścień oporowy	1 szt.

Specyfikacja 5

Nazwa produktu: Hydra pen H2
Zasilacz: 5V, 1000mA
Waga: 430g
Rozmiar opakowania: 200x100x80mm

Gwarancja

1. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
2. W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z www.permanent24.pl
3. Zapewniamy serwis urządzenia w przeciągu od 1 do 14 dni od chwili otrzymania urządzenia wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Nie objęte gwarancją są: uszkodzenia mechaniczne, złamanie kabla, przepalenie zasilacza.

Importer

TRADERON
ul. Kieślowskiego 3d/42, 02-962
Warszawa, Polska
VAT: PL6711009139

Środki ostrożności 6

	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.
	Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób: 1. Które mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C 2. Które mają alergie i hemofilię 3. Które mają melanozę twarzy 4. Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne 5. Które regularnie odwiedzają szpital 6. Które przyjmują leki 7. Które mają mniej niż 12 lat
	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie
	Nie należy używać w pobliżu miejsc o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilżacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
	Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego. Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).
	Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia. Może powodować przerwania skóry.
	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.
	Przeprowadzaj kontrolę urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.
	Nikt inny niż operator nie może dotykać urządzenia. Może to spowodować wypadek lub awarię.

	Prąd przemienny		Numer seryjny
	Prąd stały		Reprezentacja UE
	Sprzęt klasy II		Symbol CE
	Uwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi		Producent
	Data produkcji		Zatrosowana część pływająca



Hydra.Pen
Skin Aesthetics Force