

Artmex

MTS & PMU System


VG



Instrukcja użytkowania



Nr	Opis
1	Podstawka na rączkę
2	Interfejs zasilania
3	Interfejs rączki
4	Zasilacz
5	Kabel

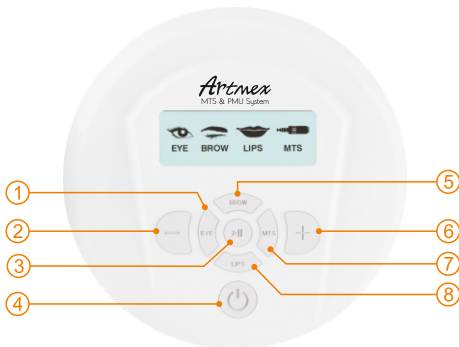

Nr	Opis
1	Tryb oko (eye)
2	Regulacja prędkości (w dół)
3	Przycisk start/pauza
4	Włącznik zasilania
5	Tryb brwi (brow)
6	Regulacja prędkości (w górę)
7	Przycisk MTS (mezoterapia)
8	Tryb usta (lip)





TRADERON


ul. Kieślowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska

VAT: PL6711009139



Sposób użytkowania

1. Podłącz akcesoria do urządzenia dołączonymi kablami

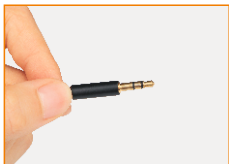


Rys 2



Rys 3

Przewód od rączki podłącz do interfejsu rączki
(jak na rysunkach Rys 2 i Rys 3)

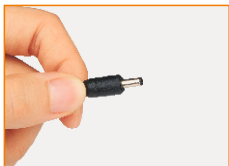

Rys 4



Rys 5

Przewód zasilacza podłącz do interfejsu zasilacza
(jak na rysunkach Rys 4 i Rys 5)



2. Podłącz zasilacz do gniazda prądowego
3. Kliknij  by włączyć urządzenia by pokazało ekran jak na Rys 6.



Rys 6

4. Wybierz tryb działania.


Kliknij  by wejść do interfejsu jak na Rys 7



Rys 7

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 4

Kliknij  by wejść do interfejsu jak na Rys 8

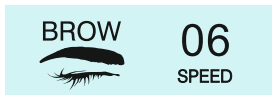

Rys 8

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 6




Kliknij  by wejść do interfejsu jak na Rys 9



Rys 9

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 6

Kliknij  by wejść do interfejsu jak na Rys 10

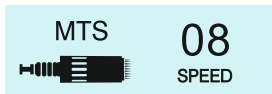

Rys 10

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 8

5. Zainstaluj kartridż z igłą. Wybierz jednorazowy kartridż do metody MTU lub PMU wg swojego przeznaczenia

6. Kliknij   by wybrać prędkość pracy


10 poziomów prędkości. Wyższy poziom, wyższa prędkość

7. Kliknij  by uruchomić rączkę/pen

8. Ustaw głębokość wysuwu igły (maksymalna głębokość to 3,00mm)
Ustawianie głębokości wysuwu igły powinno być wykonane po włączeniu rączki



1. Wyciągnij kartridż ze sterylnego opakowania.
2. Wsuń kartridż poziomo w okrągły slot ręczki.
3. Zamontuj wkręcając kartridż poprzez obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara ; wymontowanie następuj poprzez odkręcenie kartridża w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara.
4. Regulacja długości wysuwu igły/igieł powinna nastąpić po włączeniu urządzenia.

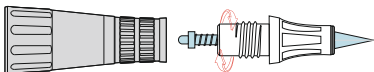

Regulacja głębokości igły

Ustaw głębokość wysuwu igły/igieł poprzez przekręcanie elementu ręczki dot. regulacji.

- Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara, wysuw igły się zwiększy.
- Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wysuw igły się zmniejszy.


Przeciw ruchowi wskazówek zegara

Długość igły będzie zmniejszana



Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Długość igły będzie zwiększana

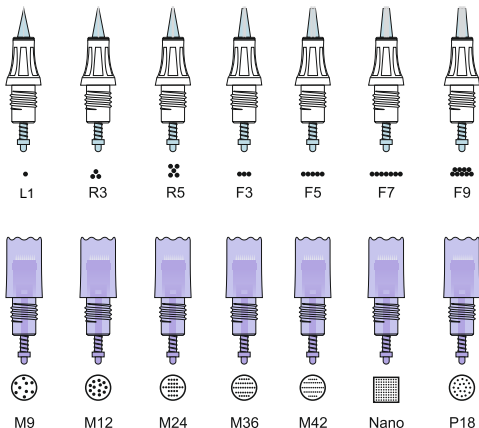

Zawartość opakowania

Przedmiot	Ilość
Jednostka centralna	1 szt.
Rączka	1 szt.
Podstawa pod rączkę	1 szt.
Zasilacz	1 szt.
Kabel	2 szt.



Informacja o produkcie	
Klasyfikacja	Zawartość
Nazwa modelu	ARTMEX-V6
Patent na produkt	Tak
Cel użytkowania	Makijaż permanentny & terapia mikroigłowa
Adapter	100V~240V
Waga	860g
Wymiar	247mm*190mm*76mm



Konserwacja

1.Podstawy konserwacji

- Trzymaj urządzenie przy wyłączonym zasilaniu. Przecieraj jego powierzchnię suchą szmatką.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury i wilgotności.
- Nie powierzaj konserwacji, napraw i modyfikacji urządzenia osobom nieuprawnionym.

2. Przegląd okresowy

- Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.



	Prąd przemienny		Numer seryjny
	Prąd przemienny		Reprezentacja UE
	Sprzęt klasy II		Symbol CE
	Uwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi		Producent
	Data produkcji		Zastosowana część pływająca
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.		
	Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób: 1.Które mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C 2.Które mają alergię i hemofilię 3.Które mają melanozę twarzy 4.Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne 5.Które regularnie odwiedzają szpital 6.Które przyjmują leki 7.Które mają mniej niż 12 lat		
	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie.		
	Nie należy używać w miejscach o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilzacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.		
	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.		
	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.		
	Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego. Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).		
	Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia. Może powodować prerażenie skóry.		
	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.		
	Przeprowadzaj kontrolę urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.		
	Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.		

Artmex

Instrukcja użytkowania