

# Artnex V8

MTS & PMU System



## Instrukcja użytkowania



### Opis produktu



| Nr | Opis                     |
|----|--------------------------|
| 1  | Rączka B                 |
| 2  | Włącznik zasilania       |
| 3  | Interfejs rączki (pen B) |
| 4  | Interfejs zasilania      |
| 5  | Interfejs rączki (pen A) |
| 6  | Rączka A                 |
| 7  | Adapter                  |

### Opis produktu



### Importer

TRADERON  
ul. Kiełowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska  
VAT: PL6711009139

### Sposób użytkowania

1. Podłącz akcesoria do urządzenia dotychczasowymi kablami



Rys 1

Rys 2

Przewód od rączki podłącz do interfejsu rączki (jak na rysunkach Rys 1 i Rys 2)



Rys 3

Rys 4

Przewód zasilacza podłącz do interfejsu zasilacza (jak na rysunkach Rys 3 i Rys 4)

### Sposób użytkowania

2. Podłącz adapter prądowy do gniazda zasilania
3. Włącz przycisk zasilania by przejść do interfejsu jak na (Rys 5)



Rys 5


4. Kliknij interfejs (Rys 5) by przejść do ekranu jak na (Rys 6)



Rys 6

### Sposób użytkowania

5. Wybór ustawienia. Kliknij a interfejs pokaże jak na Rys 7

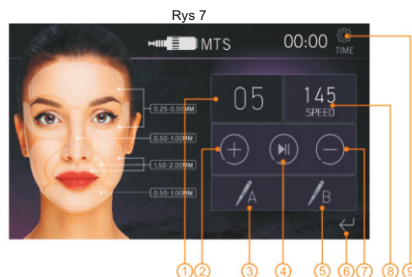

| Nr | Opis                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | Poziom                          |
| 2  | Ustawienie prędkości (w górę)   |
| 3  | Rączka A (lewa)                 |
| 4  | Przycisk Start/Pauza            |
| 5  | Rączka B (prawa)                |
| 6  | Przycisk Powrót                 |
| 7  | Ustawienie prędkości (w dół)    |
| 8  | Prędkość                        |
| 9  | Ustawienie przedziału czasowego |

### Sposób użytkowania

6. Zainstaluj kartridż w rączce. Wybierz spośród dostępnych jednorazowych, sterylnych rodzajów kartridży.
7. Kliknij lub by wybrać rączkę A lub rączkę B. Ikona będzie migać po dokonaniu wyboru rączki.
8. Kliknij lub by określić prędkość
- 10 poziomów prędkości. Wyższy poziom, wyższa prędkość. Rączka przestanie działać gdy poziom zostanie ustawiony na "0"
9. Kliknij by uruchomić rączkę
10. Ustaw głębokość pracy igły (maksymalna to 3,00mm) Ustawienie głębokości igły powinno być przeprowadzane po uruchomieniu rączki. Rączka A i Rączka B mogą być obsługiwane równocześnie w tym samym czasie. Obie rączki przestaną działać po naciśnięciu Ustaw prędkość na "0" by sprawić by rączka A lub B przestała działać samodzielnie.

**Obsługa dla trybu PMU (makiąg permanentny)**  
Funkcjonowanie w trybie PMU jest takie same jak MTS. Kliknij a interfejs pokaże jak na Rys 8




Rys 8

### Sposób użytkowania

Choose suitable operation mode according to purposes of usage

Kliknij a interfejs pokaże jak na Rys 9

- BRWI: prędkość rozpoczyna się od poziomu 6

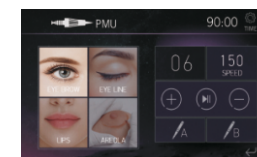

Rys 9

Kliknij a interfejs pokaże jak na Rys 10

- LINIA OCZU: prędkość rozpoczyna się od poziomu 4



Rys 10

## Sposób użytkowania

Kliknij  a interfejs pokaże jak na Rys 11

- USTA: prędkość rozpoczyna się od poziomu 6



Rys 11

Kliknij  a interfejs pokaże jak na Rys 12

- AREOLA/brodawka: prędkość rozpoczyna się od poziomu 5




Rys 12

## Sposób użytkowania

Kliknij  by wejść do interfejsu jak na (Rys 13)

Czas domyślny to 90 minut.  
Czas maksymalny to 99 minut.

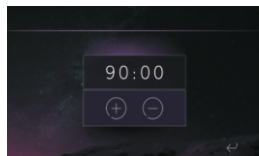

Rys 13

Używanie wskaźnika na panelu dotykowym (Rys 14)



Rys 14

## Zautomatyzowane inteligentne ręczki

Tryb stacjonarny



Rys 15

Ręczki przestają działać automatycznie, gdy pozostają w obszarze holderów (Rys 15)

Tryb pracy




Rys 16

Ręczki rozpoczynają działanie automatycznie, gdy opuszczają obszar holderów (Rys 16)

## Instalacja kartridża

1. Wyciągnij kartridż ze sterylnego opakowania.
2. Wsuń kartridż poziomo w okrągły slot ręczki.
3. Zamontuj wkręcając kartridż poprzez obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara - wymontowanie następuje poprzez odkręcenie kartridża w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara.
4. Regulacja długości wysuwu igły/igieł powinna nastąpić po włączeniu urządzenia.

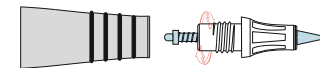

## Regulacja głębokości igły


- Ustaw głębokość wysuwu igły/igieł poprzez przekręcanie elementu ręczki do regulacji.
- Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara, wysuw igły się zwiększy.
  - Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wysuw igły się zmniejszy.



Przeciw ruchowi wskazówek zegara  
Długość igły będzie zmniejszana

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara  
Długość igły będzie zwiększana

## Rodzaje modeli kartridży

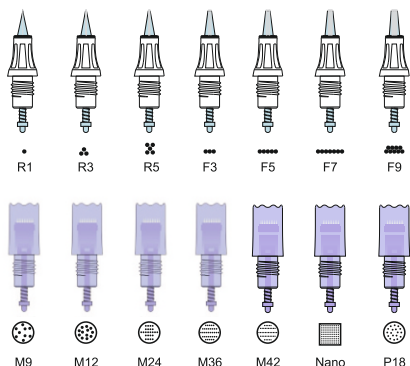

## Zawartość opakowania

| Przedmiot           | Ilość  |
|---------------------|--------|
| Jednostka centralna | 1 szt. |
| Rączka              | 2 szt. |
| Adapter             | 1 szt. |
| Kabel               | 2 szt. |
| wskaźnik            | 1 szt. |

## Specyfikacja

| Informacja o produkcie |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Klasyfikacja           | Zawartość                                 |
| Nazwa modelu           | ARTMEX- V8                                |
| Patent na produkt      | Tak                                       |
| Cel użytkowania        | Makijaż permanentny & terapia mikroigłowa |
| Adapter                | 100V~240V                                 |
| Waga                   | 2350g                                     |
| Wymiar                 | 400mm*280mm*80mm                          |

## Konserwacja

### 1.Podstawy konserwacji

- Trzymaj urządzenie przy wyłączonym zasilaniu. Przecieraj jego powierzchnię suchą szmatką.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury i wilgotności.
- Nie powierzaj konserwacji, napraw i modyfikacji urządzenia osobom nieuprawnionym.

### 2. Przegląd okresowy

- Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.

## Ostrzeżenia

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Prąd przemienny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SN                                                                                    | Numer seryjny               |
|    | Prąd przemienny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EC REC                                                                                | Reprezentacja UE            |
|   | Sprzęt klasy II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CE                                                                                    | Symbol CE                   |
|  | Uwaga,zapoznaj się z dok. towarzyszącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Producent                   |
|  | Data produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                     | Zastosowana część pływająca |
|  | Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                             |
|  | <b>Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób:</b><br>1.Którę mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C<br>2.Którę mają alergię i hemofilie<br>3.Którę mają melanozę twarzy<br>4.Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne<br>5.Którę regularnie odwiedzają szpital<br>6.Którę przyjmują leki<br>7.Którę mają mniej niż 12 lat. |                                                                                       |                             |
|  | Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                             |
|  | Nie należy używać w miejscach o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilzacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                             |
|  | Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                             |
|  | Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                             |
|  | Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego. Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                             |
|  | Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia. Może spowodować przerwanie skóry.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                             |
|  | Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                             |
|  | Przeprowadzaj kontrolę urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                             |
|  | Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             |

**Artmex** V8  
MTS & PMU System



Instrukcja użytkownika

**Permanent 24 .pl**