

Artmex V9

MTS & PMU System




Instrukcja użytkowania



Zawartość

Produkt	1
Podstawy obsługi	3
Inteligentna rączka	5
Montaż kartridża z igłą	6
Regulacja głębokości igły	6
Rodzaje modeli kartridży	7
Specyfikacja	8
Ostrzeżenia	9
Producent / importer	10

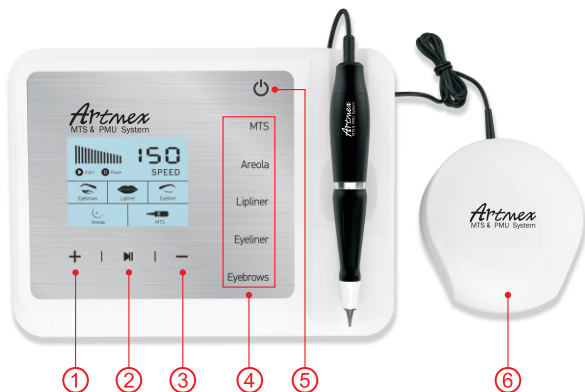

① Przyspieszenie

② Przycisk Start/Pauza

③ Spowolnienie

④ Przyciski funkcyjne

⑤ Włącznik

⑥ Pedał

⑦ Gniazdo zasilania

⑧ Gniazdo rączki

⑨ Gniazdo sterownika
nożnego





PMU - pobierany przez igłę pigment wprowadzany jest pod skórę ruchem posuwisto-zwrotnym

MTS - pozwala aby substancje medyczne były absorbowane przez skórę poprzez jej nakłuwanie

Podstawy obsługi

1. Podłącz zasilanie do jednostki głównej



Rys. 1



Zasilanie

Rys. 2

Sznur adaptera łączy się z interfejsem zasilania
(Czynność jak na Rys. 1 i Rys. 2)



Rys. 3




Rączka

Rys. 4

Podłącz kabel rączki do interfejsu mini-usb dla rączki
(Czynność jak na Rys. 3 i Rys. 4)



Rys. 5

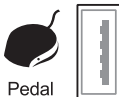


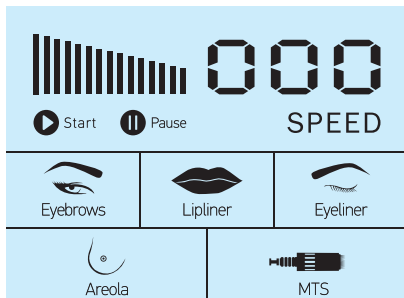
Pedal

Rys. 6

Kabel sterownika nożnego podłącz do interfejsu pedała
(Czynność jak na Rys. 5 i Rys. 6)



2. Podłącz zasilacz do źródła prądu

3. Kliknij  by włączyć urządzenie co spowoduje wyświetlenie obrazu z Rys. 7



Rys. 7

4. Wybierz funkcję z menu. Ikona zaświeci się po wciśnięciu przycisku funkcyjnego.

5. Kliknij   by wybrać poziom prędkości

11 poziomów prędkości. Im wyższy poziom tym wyższa prędkość

6. Kliknij  by uruchomić lub spażować rączkę.

Lub użyj pedała by kontrolować rączkę.

Tryb stacyjny



Rączka przestanie działać automatycznie, gdy pozostanie w obszarze holdera.

Tryb pracy



Rączka rozpocznie działanie automatycznie, gdy opuści obszar holdera.

1. Wyciągnij kartridż ze sterylnej opakowania.
2. Wsuń kartridż poziomo w okrągły slot rączki.
3. Zamontuj wkręcając kartridż poprzez obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara ; wymontowanie następuj poprzez odkręcenie kartridża w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara.
4. Regulacja długości wysuwu igły/igieł powinna nastąpić po włączeniu urządzenia.



Regulacja głębokości igły

Ustaw głębokość wysuwu igły/igieł poprzez przekręcanie elementu rączki dot. regulacji.

- Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara, wysuw igły się zwiększy.
- Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wysuw igły się zmniejszy.





M1



L1



R3-M



R3-L



R5



F3



F4



F5



F7



F9



S3



S5



V9



V12



M9



M12



M24



M36



M42



Nano



P18

【Nazwa modelu】 : ARTMEX - V9

【Waga】 : 2100g

【Adapter】 : 100V~240V

【Wymiar】 : 290mm*273mm*105mm

【Patent na produkt】 : Yes

【Cel użytkowania】 : Makijaż permanentny
& terapia mikroigłowa

Konserwacja

1. Podstawy konserwacji


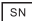
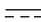

















- Trzymaj urządzenie przy wyłączonym zasilaniu. Przecieraj jego powierzchnię suchą szmatką.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury i wilgotności.
- Nie powierzaj konserwacji, napraw i modyfikacji urządzenia osobom nieuprawnionym.

2. Przegląd okresowy

- Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.

Zawartość opakowania

Jednostka centralna	1 pc
Rączka	1 pc
Adapter	1 pc
Pedał	1 pc

	Prąd przemienny		Numer seryjny
	Prąd przemienny		Reprezentacja UE
	Sprzęt klasy II		Symbol CE
	Uwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi		Producent
	Data produkcji		Zastosowana część pływająca
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.		
	Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób: 1. Które mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C 2. Które mają alergię i hemofilie 3. Które mają melanozę twarzy 4. Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne 5. Które regularnie odwiedzają szpital 6. Które przyjmują leki 7. Które mają mniej niż 12 lat		
	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie.		
	Nie należy używać w miejscach o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotności (W pobliżu nawilzacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.		
	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.		
	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.		
	Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego. Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).		
	Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia. Może powodować prerażenie skóry.		
	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.		
	Przeprowadzaj kontrolę urządzenia. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek problemy, napraw je.		
	Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.		

Importer: TRADERON

ul. Kieślowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska

VAT: PL6711009139

Artmex
MTS & PMU System

 Permanent **24**.pl